

附件、流感病毒核酸快速檢測採檢須知

Alere™ i Influenza A&B 流感病毒核酸快速檢測採檢須知



可採集「**鼻腔拭子(Nasal Swab)**」或「**鼻咽拭子(Nasopharyngeal Swab)**」
請使用 Alere™ i Influenza A&B 專屬之採檢拭子採集檢體。採檢步驟如下：



Nasal swab

鼻腔拭子(Nasal Swab)

1. 將拭子小心地插入流鼻水情況最嚴重或鼻塞最嚴重的鼻孔。
2. 輕輕旋轉，推動拭子，直至在鼻甲骨處遇到阻力。
3. 對鼻腔壁旋轉拭子數次，然後慢慢從鼻孔中取出。



Nasopharyngeal

鼻咽拭子(Nasopharyngeal Swab)

1. 將拭子小心地插入流鼻水情況最嚴重或鼻塞最嚴重的鼻孔。
2. 輕輕旋轉，將拭子放入鼻孔前側，平行於上顎將拭子推進到鼻咽部。
3. 留在原處數秒，然後在撤回拭子時慢慢旋轉拭子。

完成檢體採集後，請將拭子檢體放入原包裝中，然後放入夾鏈袋中傳送至實驗室。

注意！請避免採集到帶血之檢體。紅血球可能會干擾檢測。檢體僅可在室溫保存2小時，若無法於2小時完成檢測，請將檢體冷藏於2-8°C並在檢體採集後之24小時內進行檢測。