

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：408

日期：112年08月26日

- 公告事項：
1. 檢驗項目Urine Microalbumin因原廠試劑暫停供貨使用替代方案
 2. 新增檢驗項目Elastase 1 彈性蛋白酶 1
 3. 檢驗項目DR-70報告延遲通知

1. 檢驗項目Urine Microalbumin因SIEMENS原廠試劑暫停供貨，自112年8月30日起之送檢檢體使用FUJIFILM Autokit Micro Albumin之替代方案發出報告，報告數據無需公式轉換，參考區間不變，待原廠試劑恢復正常供貨將另行通知，造成困擾請見諒。

檢驗項目： Microalbumin，ACR，UACR

健保編號： 12111C 微白蛋白

健保點數： 275

自費收費： 600

檢體採集： 隨機尿液0.3-2.0mL，以早上第二次的尿液最好。24小時尿液，登錄總量，混合整桶，轉移0.3-2.0mL到塑膠試管，標示總量送檢。

檢體退件：血液檢體

報告時效： 每天

分析方法： Urine：Turbidimetric immunoassay，FUJIFILM
Siemens (uALB) = FUJIFILM (uALB) x 1.0

參考區間： Urine：Random：<20.00 mg/L，24 Hr.：<30.00 mg/day

(2022年版檢驗目錄 p.272)(原分析方法：PEG enhanced immunoturbidimetric，ADVIA Chemistry XPT，SIEMENS)

2. 自112年9月1日起，新增檢驗項目Elastase 1 彈性蛋白酶 1，相關內容如下：

檢驗項目： Elastase 1

健保編號： 無 彈性蛋白酶 1

健保點數： 無

自費收費： 800

檢體採集： 血清、血漿(EDTA、Heparin) 0.3 mL (或全血1.5mL)。

保存2-8°C一週，-40°C可保存一個月。

檢體退件：檢體量不足0.3 mL

報告時效： 每週五操作，當日發報告

分析方法： Latex immunoassay，ADVIA Chemistry XPT，Medience

參考區間： <300 ng/dL

臨床意義： 用於胰臟癌的早期發現！彈性蛋白酶1是對胰臟疾病具有特異性的胰蛋白酶，其在胰管或胰管分支堵塞時明顯上升。且在血液中的半衰期長，血液中顯示高值的時間也長，因此有利於早期發現胰臟癌。

用於急性胰臟炎的診斷！急性胰臟炎在病發早期階段，任何胰蛋白酶都顯示異常的高值，一般在發病2、3天後會迅速下降。而彈性蛋白酶1，因血液中的半衰期長，即使其他的胰蛋白酶下降後也能測出異常高值。因此，即使發病的早期階段沒能測出血液中的胰蛋白酶的病例，大部分在過幾天後檢驗彈性蛋白酶1則能診斷出胰臟炎。彈性蛋白酶1對胰臟的特異度及靈敏度都高於澱粉酶，作為急性胰臟炎的診

斷非常有效。

檢驗單位：台北大安聯合

3. 因原廠原物料短缺，檢驗項目DR-70，Onko-Sure癌症風險，自08月29日起報告將延後操作，預計9月中旬恢復正常報告時效，造成不便敬請見諒

謹此敬告週知修正，通知事項同步公告於本所網頁



陳明輝

大安聯合醫事檢驗所
負責人 陳明輝 敬上