

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：461

日期：114年11月20日

- 公告事項：
1. 檢驗項目Anti-Gastric Parietal Cell Antibodies, Anti-GPC Ab 壁細胞抗體，因原使用廠牌Immco供貨不及，變更檢驗試劑廠牌
 2. 因文件審查，修正Amoeba Trophozoite (MIF糞便濃縮染色法)、Stool Routine、Parasite Screen等糞便採集內容
 3. 因文件審查，修正Neuron Specific Enolase, NSE神經元特異性烯醇酶 參考區間

1. 1114年11月25日起，檢驗項目Anti-Gastric Parietal Cell Antibodies, Anti-GPC Ab壁細胞抗體，因原廠牌Immco供貨不及，變更檢驗試劑廠牌，說明如下：

檢驗項目：Anti-Gastric Parietal Cell Antibodies, Anti-GPC Ab

健保編號：12058B 壁細胞抗體

分析方法：Indirect Immunofluorescence assay (IFA), EUROIMMUN

(2025年版檢驗目錄p.42)(原試劑廠牌：Immco)

檢體採集：0.5 mL血清(或全血1.0mL)，保存在2-8℃穩定14天。長期保存請置-20℃冷凍

檢體退件：溶血4+；嚴重脂血；所有血漿檢體

參考區間：1:10(-)

報告區間：1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、>1:640(+)

報告時效：每週二、五核發報告，遇假日順延至下一工作日

2. 即日起，檢驗項目Amoeba Trophozoite, Cyst阿米巴痢疾(MIF糞便濃縮染色法)、Stool Routine, Routine Stool Analysis糞便一般檢查、Parasite Screen寄生蟲卵抹片檢查，修正檢體採集內容，說明如下：

檢驗項目：Amoeba Trophozoite, Cyst 阿米巴痢疾

檢體採集：採集新鮮糞便，下痢、血便者應採其檢體中帶有膿血、黏液部份，取1公克(約拇指頭大小，請勿過量)；...

(2025年版檢驗目錄p.27)(原檢體採樣：...取1公克(約一粒花生米大小，請勿過量...))

檢驗項目：Stool Routine, Routine Stool Analysis 糞便一般檢查

檢體採集：使用平鋪衛生紙、便盆，解得糞便，取1公克(約拇指頭大小)的糞便，放入無菌有蓋的塑膠杯(不能有衛生紙)

(2025年版檢驗目錄p.341)(原檢體採樣：...取下約一節小指(大顆花生米)大小的糞便...)

檢驗項目：Parasite Screen寄生蟲卵抹片檢查

檢體採集：寄生蟲體、幼蟲、蟲卵，並不是隨時可以被發現，最好能提供三次檢體，各間隔2-3天，解大便於乾淨容器或紙上，以內附攪拌棒挖取約拇指頭大小(1g)之糞便。

(2025年版檢驗目錄p.297)(原檢體採樣：...以內附攪拌棒挖取約一粒花生米大小(1g)之糞便...)

3. 即日起，檢驗項目Neuron Specific Enolase, NSE神經元特異性烯醇酶，修正參考區間，說明如下：

檢驗項目：Neuron Specific Enolase, NSE 神經元特異性烯醇酶

參考區間：≤16.300 ng/mL

(2025年版檢驗目錄p.280)(原參考區間：<16.300 ng/mL)



大安聯合醫事檢驗所
負責人 陳明輝 敬上