

附件二、 檢體可補加測項目及時間

檢體送至本所後，若因顧客要求或有其他狀況需加測、複驗檢驗項目，但檢體因保存與一些檢驗限制（如：穩定度），並非每個項目皆可加驗，詳細資料如下：

生化項目：

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
血糖 Glucose-Blood	血清(兩個小時內分離血清) 或使用 NaF 灰頭血糖管	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 室溫、一天(NaF 管)
葡萄糖-腦脊髓液 Glucose-CSF	腦脊髓液 CSF	2-8°C，不複驗
醣化血色素 Glycosylated Hemoglobin; HbA1c	EDTA 全血	2-8°C，3 天
澱粉酵素 Amylase	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 2-8°C，10 天(尿液)
麩氨酸轉移酵素 γ-Glutamyl transferase; γ-GT	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
丙氨酸轉胺酵素 Alanine aminotransferase; ALT	血清 serum	-15 ~ -20°C，3 天
天門冬氨酸轉胺酵素 Aspartate acid aminotransferase; AST	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
鹼性磷酸酵素 Alkaline phosphatase; Alk-P	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
肌酸激酵素 Creatine kinase; CK	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
乳酸脫氫酵素 Lactic dehydrogenase; LD	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
脂酵素 Lipase	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
膽素脂酵素 Cholinesterase	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
葡萄糖-6-磷酸脫氫酵素 G6PD	EDTA 全血	2-8°C，3 天
肌酸激酵素 Creatine Kinase MB form，CK-MB	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
骨質特異性鹼性磷酯酶 Ostase Bone Alkaline Phosphatase(BAP)	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
三酸甘油脂 Triglyceride	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
膽固醇 Cholesterol	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
高密度脂蛋白膽固醇 HDL-Cholesterol	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
低密度脂蛋白膽固醇 LDL-Cholesterol	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
肌酸酐 Creatinine	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 2-8°C，10 天(尿液)
尿酸 Uric acid	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 2-8°C，10 天(尿液)
血中尿素氮 Blood urea nitrogen; BUN	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
尿中尿素氮 Urine urea nitrogen	尿液 urine	2-8°C , 10 天(尿液)
總膽紅素 Total bilirubin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 檢體須避光,不建議原管複驗
直接膽紅素 Direct bilirubin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 檢體須避光,不建議原管複驗
總蛋白質 Total protein	血清 serum 尿液 urine 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液) 2-8°C , 不複驗(CSF)
白蛋白 Albumin	血清 serum 尿液 urine 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液) 2-8°C , 不複驗(CSF)
乳酸 Lactic acid	NaF plasma CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(Plasma) 2-8°C , 不複驗(CSF)
血清酮體 Serum ketone body	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
血清鐵與總鐵結合能 Serum iron and total iron binding capacity	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
心肌旋轉蛋白 I Troponin-I, TnI	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
高半胱胺酸 Homocysteine, Hcy	EDTA 血漿	-15 ~ -20°C , 10 天
脂蛋白酶元 A1 Apolipoprotein A-1	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
脂蛋白酶元 B Apolipoprotein B	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
脂蛋白 a Lipoprotein (a)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
蛋白質電泳 Protein electrophoresis	血清 serum 尿液 urine 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液) 2-8°C , 不複驗(CSF)
脂蛋白電泳 Lipoprotein electrophoresis	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
乳酸脫氫酵素同功酵素電泳 LD isoenzymes electrophoresis	血清 serum	-15 ~ -20°C , 不複驗
肌酸激酵素同功酵素電泳 Creatine kinase isoenzymes electrophoresis	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
免疫電泳 Immunoelectrophoresis, IFE	血清 serum 尿液 urine 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液) 2-8°C , 不複驗(CSF)
鈉離子 Sodium; Na	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
鉀離子 Potassium; K	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
氯離子 Chloride; CL	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
鎂離子 Magnesium; Mg	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天 2-8°C , 10 天(尿液)

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
鈣離子 Calcium; Ca	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
無機磷 Inorganic phosphorus; P	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
鋰離子 Lithium; Li	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
血中氨 Blood ammonia	血漿 全血	-15 ~ -20°C , 因反覆冷凍解凍會影響 檢體濃度, 不建議原管複驗
滲透壓 Osmotic pressure	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 因環境(空氣)汙染之可 能, 不建議原管複驗
游離鈣 Free Calcium	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
二氧化碳 CO ₂ Content	血清 serum 或 heparinized plasma 0.5 mL 加蓋	-15 ~ -20°C , 因環境會影響濃度之可 能, 不建議原管複驗
香莢杏仁酸定量 VMA Vanillyl mandelic acid quantitation	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
17-酮固醇 17-Ketosteroids; 17-KS	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
17-氫氧根腎上腺酮 17-OHCS 17-hydroxycorticosteroids	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天

賀爾蒙項目：

絨毛膜促性腺激素-乙亞單體 β-HCG(Down's Risk Second Trimester using Total β -HCG)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
三碘甲狀腺素 Triiodothyronine;T3	血清 serum	-15 ~ -20°C , 3 天
甲狀腺素 Thyroxine;T4	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
皮質醇 Cortisol	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
生長激素 Human growth factor	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
催乳激素 Prolactin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
濾泡刺激素 Follicle stimulating hormone; FSH	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
黃體激素 Leuteinizing hormone; LH	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
胰島素 Insulin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 3 天
黃體脂酮 Progesterone	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
雌性素 Estrogen , 二氫基春情素免疫分析 Estradiol , E2	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
睪固酮 Testosterone	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
C-勝太胰島素 C-peptide	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
副甲狀腺素 Parathyroid hormone; PTH-i	血清 serum 血漿 EDTA	-15 ~ -20°C , 10 天
降鈣素 Calcitonin	血清 serum	-15~ -20°C , 因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度, 不建議原管複驗
促腎上腺激素 ACTH Adrenocorticotrophic Hormone	血漿 EDTA	-15~ -20°C , 因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度, 不建議原管複驗
腎上腺素 Epinephrine	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
甲狀腺促進素 TSH Thyroid Stimulating Hormone	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
正腎上腺素 Norepinephrine	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
鄰苯二醇氨 Catecholamine	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
游離人類絨毛膜激素 Free β-HCG (Down's Risk Second Trimester using Free β -HCG)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
游離甲狀腺素 Free Thyroxine; Free T4	血清 serum	-15 ~ -20°C , 7 天
5-氫氧吲哚基醋酸 5-HIAA 5-Hydroxyindoleacetic acid	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
游離三碘甲狀腺素免疫分析, Triiodothyronine Free , Free T3	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
三碘甲狀腺原氨酸攝取率 Triiodothyronine Uptake Ratio , TU , T3 Resin Uptake Ratio	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
硫化脫氫異雄固酮 DHEA-S Dehydroepiandrosterone Sulfate	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
懷孕關聯血漿蛋白質 A Pregnancy Associated Plasma Protein-A , PAPP-A(Down's Risk First Trimester using PAPP-A and Freeβ hCG)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抑制素 A Inhibin A	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
紅血球生成因子 Erythropoietin , EPO	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
同香草酸 Homovanillic acid , HVA	24 小時尿液 urine : 標示總量	-15 ~ -20°C , 7 天
β-天門冬氨酸 β-CrossLaps , CTx	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
春情素醇 Estriol , Unconjugated E3	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
人類性荷爾蒙結合球蛋白 SHBG , Human sex hormone-binding globulin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
類胰島素成長因子 Somatomedin-C Insulin-like Growth Factor 1 , IGF-1	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
二氫睪固酮 Dihydrotestosterone , DHT	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
前 B 型利鈉激素 NT-proBNP	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
前降鈣素原 Procalcitonin、PCT	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
維他命 D Vitamin D	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
維他命 B12, Vitamin B12	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
葉酸 Folic acid	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

血液項目：

A、B、O 血型系統 A、B、O blood group systems	EDTA 全血	2-8°C , 3 天
Rh 型系統 Rh blood group system	EDTA 全血	2-8°C , 3 天
交叉配合試驗 Cross-matching test	受血者紫頭全血一管， 受血者血清一管； 供血者標示血袋號碼的軟管	2-8°C , 3 天
抗球蛋白試驗 Anti-globulin tests	EDTA 全血	2-8°C , 3 天
不規則抗體篩檢 Irregular antibody screen	血清 serum EDTA 全血	2-8°C , 3 天
紅血球計數 RBC Count	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
血色素 Hemoglobin; Hb	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
血球容積比 Hematocrit; Hct	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
紅血球沉降速率 ESR Erythrocyte sedimentation rate	EDTA 全血 2 mL 一管。 3.2% buffered Sodium citrate 液體 1：4 血液體積的藍頭或 黑頭管也可以直接使用。	2-8°C , 1 天 因血球狀況會影響測定，不建議原管 複驗
網狀紅血球計數 Reticulocyte count	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
紅血球形態 RBC Morphology	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
血色素電泳 Hemoglobin electrophoresis	EDTA 全血	2-8°C , 3 天
白血球計數 WBC Count	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
白血球分類計數 WBC Differential Count	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
白血球形態 WBC morphology	EDTA 全血	2-8°C , 1 天
血小板計數 Platelet Count	EDTA 全血	2-8°C , 1 天

血液凝固項目：

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
凝血酵素原時間 Prothrombin time; PT	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
部份凝血活酵素時間 APTT Activated partial thromboplastin time	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
第三抗凝血酵素測定 Anti-Thrombin III test	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
C 蛋白 Protein C	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
D-D 雙合試驗 D-D dimer test	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
纖維蛋白原定量測定 Fibrinogen quantitation	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
纖維元蛋白分化物 Fibrin degradation product FDP	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
S 蛋白 Protein S	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗
狼瘡抗凝血因子 Lupus Anti coagulant	3.2% Sodium citrate	-15~ -20°C，因反覆冷凍解凍會影響檢體濃度，不建議原管複驗

血清免疫項目：

免疫球蛋白 A Immunoglobulin A; IgA	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天(血清)
免疫球蛋白 E Immunoglobulin E; IgE	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
免疫球蛋白 M Immunoglobulin M; IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天(血清)
免疫球蛋白 D Immunoglobulin D; IgD	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
免疫球蛋白 G Immunoglobulin G; IgG	血清 serum 或 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 2-8°C，不複驗(CSF)
C 反應蛋白 C-reactive protein; CRP	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
補體-3 檢查 Complement 3 examination; C3	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
補體-4 檢查 Complement 4 examination; C4	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
α1-抗胰蛋白胨 α1-antitrypsin	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
β2-細球蛋白 β2-microglobulin	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C，10 天(血清) 2-8°C，10 天(尿液)
藍胞漿素 Ceruloplasmin	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
結合蛋白 Haptoglobin	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
運鐵蛋白 Transferrin	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
鐵蛋白 Ferritin	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
肌球蛋白 Myoglobin	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 10 天(尿液)
冷凝球蛋白 Cryoglobulin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
微白蛋白 Microalbumin	尿液 Urine 腦脊髓液 CSF	2-8°C , 10 天(尿液) 2-8°C , 不複驗(CSF)
抗鏈球菌溶血素 O 效價試驗 Anti-streptolysin O test; ASO	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
發熱疾病的凝集試驗 Widal & Weil-Felix test	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
血清前白蛋白定量 Prealbumin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
類風濕性關節炎因子試驗 Rheumatoid factor test; RF	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
冷凝集素 Cold hemoagglutinin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗細胞核抗體 Anti-nuclear antibody; ANA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
微粒體抗體 Anti-microsomal antibody; AMA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
粒腺體抗體 Anti- mitochondrial antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
平滑肌抗體 Anti-smooth muscle antibody; ASMA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
壁細胞抗體 Anti-parietal cell antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
去氧核糖核酸抗體 Anti-Double Stranded DNA Antibodies	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
去氧核糖核酸抗體 Anti-Double Stranded DNA Antibodies 定量法	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
可抽出的核抗體定性試驗 Anti-ENA qualitative antibody test	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
甲狀腺球蛋白抗體 Anti-Thyroglobulin antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗嗜中性球細胞質抗體 Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies , ANCA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗心脂抗體-IgG Anticardiolipin Antibodies IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗心脂抗體-IgM Anticardiolipin Antibodies IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗環瓜氨酸抗體 anti-cyclic citrullinated peptide antibodies, Anti-CCP	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
抗甲狀腺過氧化酶抗體 Anti-Thyroid Peroxidase antibody 、 Anti-TPO	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
α-胎兒蛋白 α-fetoprotein; AFP	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
癌胚胎抗原 Carcinoembryonic antigen; CEA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
CA-125 標記 CA-125	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
CA-153 標記 CA-153	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
CA-199 標記 CA-199	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
SCC 標記 SCC	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
攝護腺特異抗原 Prostate specific antigen; PSA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
CA-72-4 標記; CA-72-4	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Cyfra 21-1 標記; Cyfra 21-1	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
NSE 標記 Neuron Specific Enolase , NSE	血清 serum	-15 ~ -20°C , 3 天
Thyroglobulin Thyroglobulin 標記	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
過敏原試驗定性 Allergen test qualitation	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
特異過敏原免疫試驗 Specific allergen test	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
嗜伊紅血球陽離子蛋白試驗(ECP) ECP test Eosinophil Cationic Protein	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
組織抗原 B27 HLA-B27	EDTA 全血	2-8°C , 7 天

細菌

需氧細菌類培養 Aerobic bacteria culture	骨髓、膿、體液、尿、糞便、軟組織、眼、痰、腦脊髓液、穿刺液	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
厭氧細菌類培養 Anaerobic bacteria culture	各種穿刺抽取之体液(如血液, CSF, 胸水, 腹水, 尿液...)	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
真菌培養 Fungus Culture	陰道/呼吸道棉棒，尿液，指甲，毛髮或皮膚	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
血液培養 Blood Culture	血液	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
革蘭氏染色 Gram stain	各類檢體	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
抗酸性染色 Acid fast stain	Sputum 痰液 各類檢體	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
真菌染色 Fungus stain	各類檢體	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
細菌藥敏試驗 Drug sensitivity test for bacteria	各種檢體分離之菌種	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
新型隱球菌抗原試驗 Cryptococcus neoformans antigen test	血清 serum 或 腦脊髓液 CSF	檢體分析是一次性，不進行原管複驗

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
披衣菌抗原試驗 Chlamydia trachomatis antigen test	尿沈渣或分泌物	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
肺炎黴漿菌抗體試驗 Mycoplasma pneumonia antibody test	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
退伍軍人症血清試驗 Legionnaires' disease serum test	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
細菌 Catalase 酵素試驗 Bacterial catalase test	各種檢體分離之菌種	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
細菌生化試驗 Bacterial biochemical test	各種檢體分離之菌種	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
披衣菌 IgG 抗體 Chlamydia trachomatis IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
披衣菌 IgA 抗體 Chlamydia trachomatis IgA	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
披衣菌 IgM 抗體 Chlamydia trachomatis IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
肺炎披衣菌抗體試驗 Chlamydia pneumoniae test	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
結核分枝桿菌 DNA 檢查 Examination of mycobacterium tuberculosis DNA	痰液 sputum、尿液 urine 或體液 Body Fluid	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
披衣菌檢查 Chlamydia DNA	尿沈渣或分泌物	檢體分析是一次性,不進行原管複驗
淋病雙球菌 DNA Gonorrhea DNA	尿沈渣或分泌物	檢體分析是一次性,不進行原管複驗
幽門曲狀桿菌檢驗 Helicobacter pylori Antibodies	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天

病毒項目：

呼吸道融合病毒抗原 Respiratory syncytial virus Ag	鼻腔抽取液、深咳痰液、 或喉頭棉棒	檢體分析是一次性,不進行原管複驗
輪狀病毒抗原 Rota virus antigen	糞便 Stool	檢體分析是一次性,不進行原管複驗
A 型肝炎病毒抗體 Anti-HAV	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
A 型肝炎抗體免疫球蛋白 M 檢查 Hepatitis A IgM，HAV IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒表面抗原 HBs Ag Hepatitis B virus surface antigen	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒抗表面抗原抗體 Anti-HBs	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒 e 抗原 HBe Ag	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒抗 e 抗原抗體 Anti-HBe	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒抗核心抗原抗體 Anti-HBc	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
B 型肝炎病毒抗核心抗原 IgM 抗體 Anti-HBc IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
C 型肝炎病毒抗體 Anti-HCV	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
EB 病毒殼 IgG 抗體 EBV VCA IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
EB 病毒殼 IgA 抗體 EBV VCA IgA	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
EB 病毒殼 IgM 抗體 EBV VCA IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
EB 病毒早期抗原 IgG 抗體 EBV EA IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
EB 病毒核抗原抗體 EBNA antibody (IgG)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
後天免疫不全症候群抗體—篩檢 HIV antibody—Screening	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
人類 T 淋巴白血病毒第一型抗體 Anti-HTLV 1 antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
德國麻疹病毒 IgG 抗體 Rubella virus IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
德國麻疹病毒 IgM 抗體 Rubella virus IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
麻疹病毒 IgG 抗體 Measles virus IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
麻疹病毒 IgM 抗體 Measles virus IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
第一型單純疱疹病毒特異性抗體 Herpes simplex virus type 1 specific antibody	血清 serum 血漿 plasma	-15 ~ -20°C , 10 天(血清、血漿)
第一型單純疱疹病毒特異性抗體免 疫球蛋白 M 檢查 Herpes simplex virus type 1 specific antibody IgM	血清 serum 血漿 plasma	-15 ~ -20°C , 10 天(血清、血漿)
第二型單純疱疹病毒特異性抗體 Herpes simplex virus type 2 specific antibody	血清 serum 血漿 plasma	-15 ~ -20°C , 10 天(血清、血漿)
第二型單純疱疹病毒特異性抗體 Herpes simplex virus type 2 specific antibody IgM	血清 serum 血漿 plasma	-15 ~ -20°C , 10 天(血清、血漿)
水痘帶狀疱疹病毒 IgG 抗體 Varicella zoster virus IgG antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
水痘帶狀疱疹病毒 IgM 抗體 Varicella zoster virus IgM antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
巨細胞病毒 IgG 抗體 CMV IgG Cytomegalovirus IgG antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
巨細胞病毒 IgM 抗體 CMV IgM Cytomegalovirus IgM antibody	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
退伍軍人症尿液試驗 Legionnaires' disease Urine test	尿液 Urine	2-8°C , 10 天
HCV 病毒負荷量檢查 HCV viral load examination	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
HBV 病毒負荷檢查 HBV viral load examination	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
後天免疫不全症候群結構蛋白為核 心蛋白 p24 HIV Ag/Ab Combo	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
弓漿蟲 IgG 抗體 Toxoplasma IgG	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
弓漿蟲 IgM 抗體 Toxoplasma IgM	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
梅毒試驗-RPR/VDRL RPR/VDRL test	血清 serum 腦脊髓液 CSF	-15 ~ -20°C , 10 天(血清) 2-8°C , 不複驗(CSF)
梅毒螺旋體血液/膠體凝集試驗 TPHA/TPPA test	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
梅毒抗體間接螢光染色法 FTA-ABS	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
瘧原蟲鑑定 Malaria identification	全血 Whole Blood	2-8°C , 1 天

微量金屬項目：

鉛 Lead; Pb	全血 尿液 urine	2-8°C , 因環境(空氣)汙染之可能， 不建議原管複驗
鋅離子 Zinc; Zn	血清 serum	2-8°C , 因環境(空氣)汙染之可能， 不建議原管複驗
銅離子 Copper; Cu	血清 serum 尿液 urine	2-8°C , 因環境(空氣)汙染之可能， 不建議原管複驗
鋁 Aluminum; Al	重金屬真空血清管 serum	2-8°C , 因環境(空氣)汙染之可能， 不建議原管複驗

藥物項目：

酒精 Alcohol	血清 serum 尿液 urine	-15 ~ -20°C , 因環境會影響濃度之可能， 不建議原管複驗
安非他命 Amphetamine	尿液 urine	2-8°C , 10 天
巴比妥酸鹽 Barbiturate	尿液 urine	2-8°C , 10 天
大麻 Cannabis	尿液 urine	2-8°C , 10 天
古柯鹼 Cocaine	尿液 urine	2-8°C , 10 天
嗎啡 Morphine	尿液 urine	2-8°C , 10 天
苯重氮基鹽類濃度 Benzodiazepines Screen	尿液 urine	2-8°C , 10 天(尿液)
天使塵濃度 Phencyclidine	尿液 urine	2-8°C , 10 天
Amikacin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
健大黴素 Gentamycin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
萬古黴素 Vancomycin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Methotrexate 抗癌藥物測定	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Salicylate 抗消炎藥物測定	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
卡巴馬平 Carbamazepine , Tegretol	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
發爾波克 Valproic Acid , Valproate(Depakene)	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Phenobarbital 抗癲癇藥測定	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Phenytoin 抗癲癇藥測定	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Primidone 抗癲癇藥測定	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
長葉毛地黃 Digoxin	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
乙醯對氨基酚 Acetaminophen	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
Theophylline 氣管擴張劑	血清 serum	-15 ~ -20°C , 10 天
血中藥物濃度測定- FK-506 FK-506 , Tacrolimus	全血 EDTA	2-8°C , 1 天
血中藥物濃度測定- 移植免疫抑制藥物 Sirolimus	全血 EDTA	2-8°C , 1 天
血中藥物濃度測定- 移植免疫抑制藥物 Cyclosporine	全血 EDTA	2-8°C , 1 天

體液項目：

精液分析包含物理性、計數、形態、運動性 Semen assay including physics, count, morphology, mobility	精液 Semen	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
尿液試紙法 10 項包含酸鹼值、比重、蛋白質定性、糖定性、尿膽元、膽紅素、苯酮體、亞硝酸鹽、白血球脂酵素、潛血 Urine strip 10 items including pH, specific gravity, protein qualitative, glucose qualitative, urobilinogen, bilirubin, ketone body, nitrite, leukocyte esterase and occult blood	尿液 urine	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
尿液苯酮體 Urine ketone body	尿液 urine	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
尿沉渣顯微鏡檢查 Urine sediments	尿液 urine	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
尿液本周氏蛋白檢查 Urine Bence Jones protein	尿液 urine	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
尿液懷孕試驗 Urine pregnancy test	尿液 urine	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
蟲卵檢查 Ova examination	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
形態鑑別 Identification of morphology	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
阿米巴抹片/染色檢查 Amoebic smear/stain examination	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗

檢驗項目	檢體名稱	檢體保存狀態及可接受補測時間
阿米巴體凝集試驗 Amoebic hemagglutination test	血清 serum	-15 ~ -20°C，10 天
糞便澱粉質染色 Fecal starch stain	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
糞便性脂肪染色 Fecal neutral fat stain	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
糞便脂肪酸染色 Fecal fatty acid stain	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
糞便潛血 Fecal occult blood	糞便 Stool	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
痰液一般及顯微鏡檢查 Sputum macro and microscopic examination	痰液 Sputum	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
腦脊髓液 Cerebrospinal fluid; CSF	腦脊髓液 CSF	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
胸膜積水 Pleural effusion	胸膜液	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
腹水 Ascites	未凝固、未離心的腹水	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
關節液 Synovial fluid	關節液 Synovial Fluid	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
心胞積水 Pericardial effusion	心胞積水 Pericardial effusion	檢體分析是一次性，不進行原管複驗
腹膜積水 Peritoneal effusion	腹膜積水 Peritoneal effusion	檢體分析是一次性，不進行原管複驗